



Atemluftmengen – Messgerät

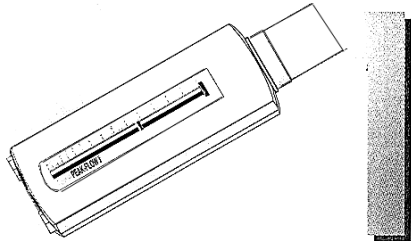

Platzieren Sie den Cursor
auf die Zone. Atmen Sie tief ein, Kinn
gehoben.
Indem Sie das Mundstück fest in den
Mund nehmen, blasen Sie
schnell und so kräftig wie möglich
in das Gerät hinein.

Handhabung

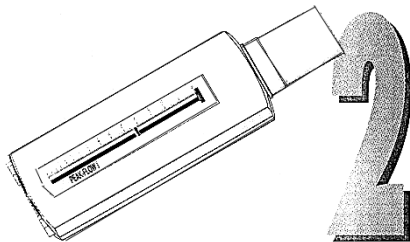

Machen Sie drei Messungen.
Ruhen Sie sich nach jeder Messung
aus.
Notieren Sie dann den besten Wert auf der

2 Jahre Garantie

- Nicht in das Gerät wie in ein
Blasrohr blasen.

- Der Cursor muss frei beweglich
sein.

- Verstopfen Sie nicht die
Luftausgänge.

- Manipulieren Sie nicht an den
Schrauben (nicht los- oder
festschrauben!)



- Spülmaschinenfest
- Sterilisation aber nur kalt
- Pflegemittel: Wasser und Seife
- nicht in kochendes Wasser legen

Pflege

Standardmodell:
Grundmodell: 400 l/min Maxi

800 l/min Maxi
CIP = 660351-5


CIP = 659765-4

Einfache

Handhabung


Atemluftmengen – Messgerät - Best.- Nr. 2012996

Einfache Handhabung Optimaler Bereich unverlierbarer Cursor universeller Ansatz + Abdeckung des Ansatzes

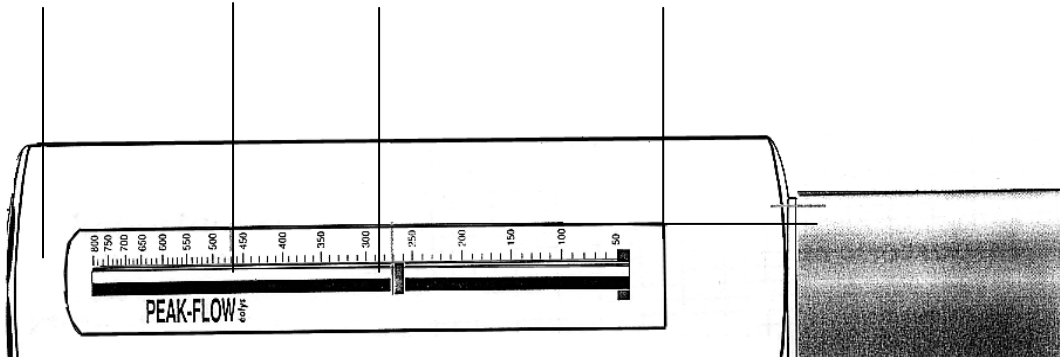


Normalitätsintervall

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen ihres Arztes; notieren Sie ihre normalen Werte.

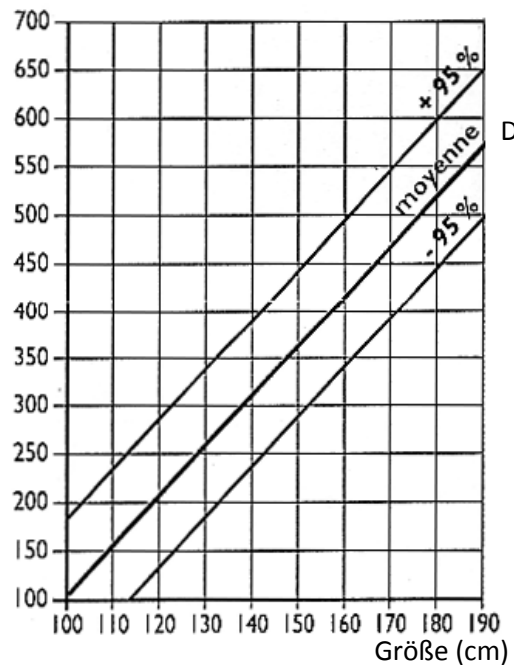

Benutzung der Skala

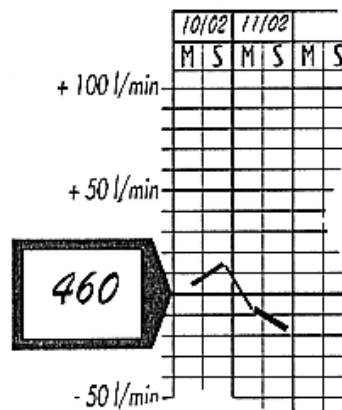


Atemluftmengen – Messgerät - Best.- Nr. 2012996

Ergebnisskala

Name:

Alter:

Größe:

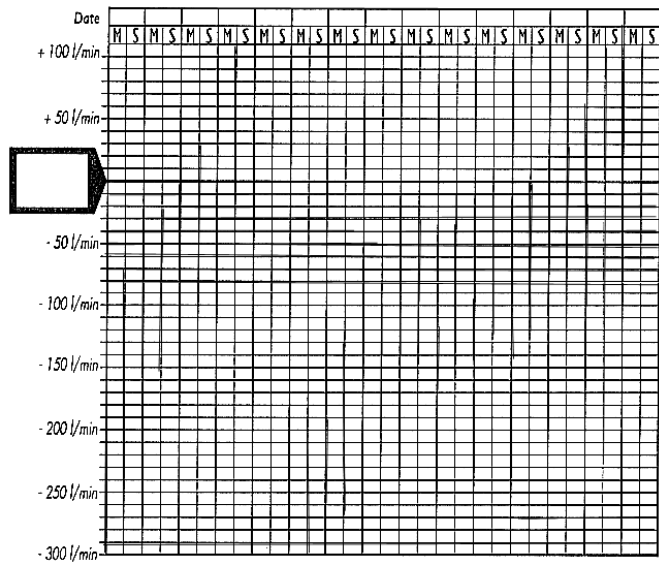

Ausfüllen der Skala

- Machen Sie insgesamt 3 Messungen.

Wichtig!

Falls Sie eine Abnahme feststellen sollten, nehmen Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.

